



A **GenoID** laboratórium a mintavétel céljaira a következő eszközöket biztosítja partnerei számára: vizsgálatkérő lap (a lap hátoldalán található a kitöltési útmutató és egyéb általános információ), férfi és női mintavevő, továbbá ezekhez illeszkedő **GenoID** mintavevőcső, illetve a nagyobb térfogatú minták (vizelet, ondó) számára szolgáló konténer.

1




Minta levétele esetén a mintavevőcsőbe való behelyezés előtt – opcionálisan – lehetőség van kenetkészítésre. A mintavevőeszközt a tiszta, zsírtalanított tárgylemezre helyezük, és kenetet készítünk.

2



A női mintavételi eszközzel levett mintát a kinyitott mintavételi csőbe helyezük, és az eszközt a perforált részen elpattintjuk. A kupak visszazárásával az eszközt a mintavételi csőbe nyomjuk. A kupak befogja a mintavételi eszköz végét, így ha esetleg a zárás nem sikerült megfelelően, akkor vigyázzunk, hogy az eszközt ne emeljük ki a csőből.

3

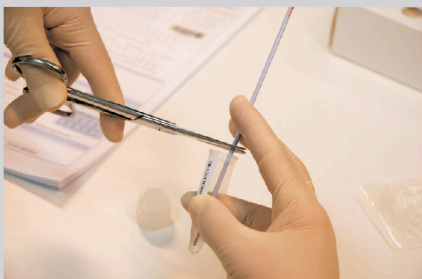

Ha nem perforált mintavevőeszközt használ, akkor emelje ki egy picit az eszközt a csőből és ollóval vágja el az ábrának megfelelően.

4



A férfi mintavételi eszközzel levett mintát a kinyitott mintavételi csőbe helyezük, és az eszközt a perforált részen elpattintjuk. A kupak visszazárásával az eszközt a mintavételi csőbe nyomjuk. Ebben az esetben az eszköz vége enyhén meghajlik. A kupak befogja a mintavételi eszköz végét, így ha esetleg a zárás nem sikerült megfelelően, akkor vigyázzunk, hogy az eszközt ne emeljük ki a csőből.

5



A mintavételi tartályra (cső vagy pohár) írja fel a beteg nevét és születési dátumát. A kettős vonalkódot válassza két részre és az egyiket a vizsgálatkérő lapra, míg a másikat az ábrán látható módon ragassza a mintavételi csőre.

6

Laboratóriumunk a „több vizsgálat – egy mintavétel” elvet alkalmazza. Ez egyrészt a beteget megkíméli a többszörös mintavétel esetleges következményeitől, másrészt biztosítja a vizsgálatok diagnosztikus érzékenységét azáltal, hogy minden vizsgálat ugyanabból, a legtöbb kórokozót tartalmazó első mintavételből készül.

A mintavétel módja: A **GenoID** mintavételi eszközök a következő minták levételére alkalmasak: cytobrush-cervix, hüvely, garat, míg az urethra mintavevő alkalmas mind a női, mind a férfi urethrális valamint anus minta levételére. A megfelelő mennyiségű minta az eszközök megforgatásával biztosítható. A vizsgálatok sejtűs mintából végezhető megfelelő érzékenységgel, így kérjük, fordítsanak gondot arra, hogy a nyálkahártyát fedő, nagyobb mennyiségű váladékok előzetesen eltávolításra kerüljenek. A nagyobb térfogatú mintákat (vizelet, ondó) az erre szolgáló vizeletes pohár konténerbe kérjük levenni. A biopsziás mintákat a **GenoID** mintavételi csőben lévő folyadékba helyezték.

Tárolás: A mintavételi eszközök tárolása szobahőmérsékleten történik, a levett mintákat tartalmazó **GenoID** mintavevő csövet, illetve a nagyobb térfogatú minták (vizelet, ondó) számára szolgáló konténer is fagyasztva (-20 °C-on) kérjük tárolni legfeljebb 1 hónapig. Amennyiben a mintákat a levétel után nem azonnal helyezik a fagyasztószekrénybe, rövid 2-4 órás tárolás lehetséges 2-8°C-on is.

Jelenleg a következő vizsgálatok kérhetők:

Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae

Mycoplasma sp. (M. genitalium, Ureaplasma urealyticum)

Herpes simplex vírus

Humán papillómavírus

Trichomonas vaginalis

Gardnerella vaginalis

A betegek érdekében a később bevezetendő vizsgálatokat is a „több vizsgálat – egy mintavétel” elv alapján illesztjük az STD laborvizsgálatok körébe.

**Ha kérdése merül fel a mintavétellel kapcsolatban, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat: 06-1/465-0124
Mintavételi eszköz igény esetén az alábbi számokat hívhatja: 06-1/425-7735 vagy 06-40/20-0484.**