

Mintavételi és -küldési tájékoztató PCA3-vizsgálathoz

Mintavétel:

1. Végezzen rektális digitális vizsgálatot. Lebenyenként kb. 1 cm mélyen, a bázistól az apex irányába, illetve oldalról a középvonal felé 3-3 nyomást alkalmazzon. (Háromnál több simításra nincs szükség, mert a túlságosan sejtű mintát nehezebb feldolgozni.)
2. Ezután gyűjtsön a beteg 20-30 ml mintát az első vizeletsugárból egy tartósítószerrel nem tartalmazó vizeletgyűjtő pohárba.
3. 15 percen belül forgassa össze a vizeletmintát, majd a mellékelt cseppentővel 2,5 ml reszuszpendált vizeletet vigyen át a transzportcsőbe (a folyadék szintjének a 2 fekete vonal közé kell esnie).
4. Csavarja rá a kupakot a transzportcsőre, és 5-szöri összeforgatással keverje össze. Írja rá a beteg nevét és születési idejét vagy TAJ-számát.

Mintaküldés:

1. Ha nem azonnal történik a szállítás, elküldésig a mintát tartsa +4°C-on. Hosszabb tárolás esetén le is fagyasztható.
2. A transzportcsövet tekerje körül a mellékelt itatóspapírral, majd az egészet helyezze bele a műanyag tartóba.
3. A kitöltött megrendelőlappal együtt juttassa el a laboratóriumba.