

MINTAVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GENETIKAI VIZSGÁLATHOZ

A DNS-vizsgálatok céljára szolgáló mintavételi csomag tartalma:

- 1 pár gumikesztyű
- 1 db mintavevő kefe
- 1 db mintatároló cső simítózáras zacskóban, benne 2 ml, egészségre ártalmatlan mintatároló folyadék
A minta levételét megelőzően, és azután is, a mintavételi csövet tartsa a hűtőszekrényben!
- csekk
- kitöltendő vizsgálatkérő adatlap
- légpárnás válaszborték

A mintavétel célja

A szájüreg belső felületén található hámsejtek normális életciklusuk során leválnak a szájüreg belső felületéről. A mintavétel során ilyen leváló nyálkahártya-hámsejteket nyerünk egy kisméretű mintavevő kefe segítségével. A minta beszállítását követően a laboratóriumban ezekből a sejtekből egy tiszta dezoxiribonukleinsav- (DNS-) preparátum készül. Ez a DNS tartalmazza a mintaadó személy génekészletét, így a minta felhasználható a kérdéses genetikai vizsgálatok elvégzésére.

A mintavétel módszere

1. A mintatároló csőre először írja rá a nevét és születési dátumát vagy TAJ-számát. Alkoholos filctollal vagy ceruzával is kiválóan lehet írni a fehér területre.
2. Ha mástól (pl. gyermek) veszi le a mintát, akkor mintavétel előtt vegye fel a gumikesztyűt. Ez azért fontos, hogy a saját kezéről ne kerülhessenek hámsejtek a mintavételi eszközre, a mintatároló csőbe, mert az idegen sejtek megzavarják a vizsgálatot.
3. A steril csomagolású kefécskét a nyél felől vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen rá, hogy a keféhez ne érjen hozzá kézzel, csak a mintavevő nyelét fogja meg. Nyissa ki a száját és MINDKÉT OLDALON LEGALÁBB 8-SZOR, KÖRKÖRÖS MOZDULATTAL, A NYELET FORGATVA DÖRZSÖLJE MEG A KEFÉVEL A SZÁJÜREG BELSŐ FELÜLETÉT (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán). Hasonlóan járjon el, ha a mintát mástól veszi le. Felhívjuk figyelmét, hogy a nem itt leírtak szerint levett mintából nem tudjuk elvégezni a vizsgálatot!
4. Ezután vegye le a mintacső tetejét és helyezze a kefét a folyadékba, majd a pálca túlnyúló végét törje le vagy vágja le ollóval olyan rövidre, hogy a csövek tetejét vissza tudja helyezni.
5. A tetőt ezután erősen csavarja rá.
6. A mintát tartalmazó csövet tegye vissza a simítózáras műanyag zacskóba, majd zárja le a zacskót.
7. A csövet elküldésig hűtőszekrényben (2 – 8 °C-on) tárolja!
8. Töltse ki a kérelmeknek azokat a rubrikáit, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azonosítani tudjuk Önt, illetve, hogy eljuttassuk a leletet Önnek. Mindenképpen szükség van tehát a név, születési dátum vagy TAJ-szám, a mintavétel dátuma és a kért vizsgálat kitöltésére, valamint, ha postán kéri az eredményt, a postázási címre, esetleg telefonszámra. Ha a vizsgálandó személy gyermek, a könnyebb postai kézbesítés céljából kérjük, a lakcím alatti üres részen adja meg annak a szülőnek a nevét, akinek a címére a leletet kéri!
9. Postán elsőbbséggel adja fel laboratóriumunk részére a légpárnás válaszbortékban a mintát tartalmazó csövet, a kitöltött megrendelőlapot és a vizsgálati díj befizetését igazoló csekk feladóvevényét (csekkes térítés esetén).

Postacím: SYNLAB Genoid Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, 1538 Budapest, Pf. 530